

## Liste simplifiée des analyses

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptif	Autre réceptif possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
ACE	ACE	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta		6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Acétone urinaire	ACU	Urines	 echantillon urine		Test fait sur urines fraîches	T° ambiante		Sur site de prélèvement
Acide urique	AUP	Sang	 héparine gel	 sérum gel jaune,sérum vec gel,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Acide urique urinaire	AUU	Urines	 urine 24h	 echantillon urine	Ne pas réfrigérer l'urine	2h à T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Acide valproïque DEPAKINE®, DEPAKOTE®, MICROPAKINE ®, DEPAMIDE®, génériques - VALPROATE DE SODIUM®.	DEPA	Sang	 héparine gel	 sérum gel jaune,sérum vec gel,plasma edta	Date du début de traitement. Posologie, fréquence et mode d'administratio n du médicament Heure de la dernière prise	T° ambiante		ARAGON
ACTH	ACTH 1	Sang	 plasma edta	 héparine INTERDIT	A prélever uniquement entre 7h et 10h du matin.	4h à T° ambiante (*)		ARAGON
Actitest	Codes voir C1-INS-08	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 héparine gel,sérum vec gel		T° ambiante	(2-8°C pour le tube Biomnis)	ARAGON + Biomnis
Adénovirus	ADEN	Selles	 selles			T° ambiante		MALASSIS
AFP	AFP	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta		6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Ag HBs	AGBS	Sang	 sérum vec gel,sérum gel jaune	 citrate,plasma edta,héparine gel		24 h à T° ambiante (**)		ARAGON
ALAT Transaminases GPT	TGP	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Exempt d'hémolyse	8 h à T° ambiante (*) à 2-8 °C	48 h	ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptif	Autre réceptif possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Albumine	ALB	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Ne pas utiliser de plasma recueilli sur fluorure.	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Amphétamine urinaire	AMPHE	Urines	 echantillon urine		Uriner au laboratoire dans un flacon sans conservateur	8 h à T° ambiante		CENTRE
Anti CCP	CCP	Sang	 sérum vec gel	 héparine gel,sérum gel jaune,plasma edta	Mettre une pastille bleue sur le tube	T° ambiante		ARAGON
Anti TG	ACTG	Sang	 sérum vec gel	 sérum gel jaune,plasma edta,héparine INTERDIT		T° ambiante		ARAGON
Anti TPO	ATPO	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,citrate,gris,plasma edta		T° ambiante		ARAGON
Anti-HAV IgG	ACAG	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta,citrate		T° ambiante		ARAGON
Anti-HAV IgM	ACAM	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta,citrate		T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Anti-HBc	ABCG	Sang	 sérum vec gel,sérum gel jaune	 plasma edta,citrate,héparine INTERDIT		24 h à T° ambiante (**)		ARAGON
Anti-HBs	ACBD	Sang	 sérum vec gel,sérum gel jaune	 plasma edta,héparine INTERDIT	Patient vacciné contre l'hépatite B ?	24 h à T° ambiante (**)		ARAGON
Anti-HCV	ACHC	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta,citrate		T° ambiante		ARAGON
Anti-recepteur TSHr	TSHR	Sang	 sérum vec gel	 sérum gel jaune	Mettre une pastille bleue sur le tube Ne pas utiliser de sérums lipémiques ou hémolysés.	T° ambiante		ARAGON
Anti-streptodornase	ASD	Sang	 sérum gel jaune,sérum gel jaune	 sérum vec gel		T° ambiante		CENTRE
Anti-streptolysine	ASL	Sang	 sérum gel jaune,sérum gel jaune	 sérum vec gel	Exempt d'hémolyse	T° ambiante		CENTRE

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Apo A1	APA1	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Apo B	APB	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
ASAT Transaminases GOT	TGO	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Exempt d'hémolyse	8 h à T° ambiante (*) à 2-8 °C	48 h	ARAGON
Baermann (recherche de larves d'anguillules)	BAER	Selles	 selles		Signes cliniques, voyages Apporter la selle au laboratoire le plus rapidement possible après émission	T° ambiante		MALASSIS
Bilharziose urinaire	BILH	Urines	 echantillon urine	 urine 24h	Voyage en Afrique Subsaharienne ? Fin de jet 1ère miction du matin, apres un effort. Rapporter dans la demi-journée au laboratoire	T° ambiante		MALASSIS

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptier	Autre réceptier possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Bilirubine directe	BDI	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Nourrisson de moins d`1 mois - placer le tube à l`abri de la lumière.	8 h à T° ambiante		ARAGON
Bilirubine Totale	BILT	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Exempt d`hémolyse Nourrisson de moins d`1 mois - placer le tube à l`abri de la lumière.	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
BW syphillis VDRL et TPHA	BW	Sang	 sérum gel jaune,sérum gel jaune	 sérum vec gel	Exempt d`hémolyse Pas d`échantillon lipémique	T° ambiante		CENTRE
CA 125	C125	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel	Contexte Clinique	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
CA 15-3	C153	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel	Contexte Clinique	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
CA 19-9	C199	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta	Contexte Clinique	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Calcium (Calcium corrigé)	CAP (CAC)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Calcium urinaire sur 24h	CAU	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil. Il est nécessaire d'ajuster le pH entre 3 et 4 avec HCl à 6 mol/L	2h à T° ambiante		ARAGON
Calcium urinaire sur échantillon	CAUE				Cf. Calcium urinaire sur 24h	T° ambiante		ARAGON
Cannabis (THC)	CANNA	Urines	 echantillon urine		Uriner au laboratoire dans un flacon sans conservateur	24 h à T° ambiante		CENTRE
Chlamydiae sérologie	SDC	Sang	 sérum gel jaune, sérum gel jaune	 héparine gel, plasma edta, citrate	T° ambiante	T° ambiante		CENTRE
Cholestérol	CH	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta	Jeûne strict de 12 heures si associé aux TG et/ou aux LDL et HDL cholestérol	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
CK	CPK	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta	Exempt d'hémolyse	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptif	Autre réceptif possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
CL Chlore (sang)	CLP	Sang	 héparine gel	 sérum gel jaune,sérum vec gel	Exempt d'hémolyse	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
CL Urinaire	CLU		 echantillon urine	 urine 24h		T° ambiante		ARAGON
CLA-30 mixte	CLAM	Sang	 sérum sans gel	 sérum gel jaune,sérum vec gel	Laisser coaguler pendant 1 à 2h	T° ambiante		BOIS-JOLI
CLA-30 pneumallergenes	CLAS	Sang	 sérum sans gel	 sérum gel jaune,sérum vec gel	Laisser coaguler pendant 1 à 2h	T° ambiante		BOIS-JOLI
CLA-30 trophallergenes	CLAT	Sang	 sérum sans gel	 sérum gel jaune,sérum vec gel	Laisser coaguler pendant 1 à 2h	T° ambiante		BOIS-JOLI
Clostridium toxine	CD2	Selles	 selles		Prise antibiotiques ?	T° ambiante		MALASSIS
CMV IgG et IgM Cytomegalovirus	CMV (deter. 1) CMV2 (deter.2)	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta		T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
CO2 Réserve alcaline	RA	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune	Mettre une pastille rose sur le tube. Ces échantillons doivent être passés en urgence car ils doivent rester le moins longtemps possible ouverts.	T° ambiante		ARAGON
Cocaine urinaire	COCAI	Urines	 échantillon urine		Uriner au laboratoire dans un flacon sans conservateur	8 h à T° ambiante		CENTRE
Compte d'Addis	HLM (incompatible avec ECBU dans même dossier)	Urines	 urine 24h		3h avant le lever - vider vessie dans toilettes Boire grand verre d'eau et se recoucher 3h puis récupérer toutes les urines.	2h à T° ambiante		Sur site de prélèvement ou MALASSIS
Coproculture	COP	Selles	 selles		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? Volume minimal - 1 noisette	2-8°C		MALASSIS

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptif	Autre réceptif possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Cortisol	COR (8h) COR1 (16h) COR 3 (entre 10h et 16h)	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Traitement, contexte clinique. Noter IMPERATIVEMENT l'heure de prélèvement. Cortisol ``8h`` ou en l'absence d'heure notée sur l'ordonnance, prélever entre 7h30 et 10 h du mati	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Créatinine clairance (incluant créatinine)	CR COCF (Formule de Cockroft F) COCH (Formule de Cockroft H)	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Créatinine clairance sur urines 24h	CLEC	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil. Pas besoin d'acidifier mais si nécessaire de le faire pour autre paramètre n'utiliser que de l'HCL	2h à T° ambiante		ARAGON
Créatinine enfant	CRS	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Créatinine urinaire 24h	CRU	Urines	 urine 24h		Cf.Créatinine clairance sur urines 24h	2h à T° ambiante		ARAGON
Créatinine urinaire sur échantillon	CRUE	Urines	 echantillon urine		Pas besoin d'acidifier mais si nécessaire de le faire pour autre paramètre n'utiliser que de l'HCL ou Ac. borique.	T° ambiante		ARAGON
Cross Laps=CTX	CROSL	Sang	 plasma edta	 sérum vec gel,sérum gel jaune,héparine gel	Contexte d'ostéoporose ? Traitement anti-osteoporose ? A JEUN avant 9 heures et toujours à la même heure. Pour	T° ambiante		ARAGON
CRP (Protéine C réactive)	CRP	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		T° ambiante		ARAGON
Cryoglobulines	CRY	Sang	 sérum sans gel		Prélever à jeun Prélèvement effectué uniquement au laboratoire. Préchauffer les tubes à 37°C	Placer les tubes immédiatement dans étuve à 37 °C pour coagulation pendant 2 h		Sur site de prélèvement
Culot urinaire	CUL	Urines	 echantillon urine		Flacon ECBU	2-8°C		MALASSIS

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
D-Dimères	DDIM	Sang	 citrate		Enceinte ? Traitement anticoagulant en cours ? Remplissage du tube >80% Garrot < 1 mi	24 h maxi. à T° ambiante	sinon congeler l'échantillon	ARAGON
Démodex	DEM	Cils			Prélever des cils à la pince à épiler	T° ambiante		Sur site de prélèvement
Densité urinaire	DEN	Urines	 echantillon urine		Flacon ECBU	< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement
Dépakine - voir Ac. valproïque						8h à 18-25°C		
DIGOXINE® Nativelle, HEMIGOXINE® Nativelle	DIGO	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta	Date du début de traitement. Posologie, fréquence et mode d'administration du médicament Heure de la dernière prise.	T° ambiante		ARAGON
Drogues urinaires	DROGU	Urines	 echantillon urine		Uriner au laboratoire dans un flacon sans conservateur	8 h à T° ambiante		CENTRE
EBV Virus Epstein Barr	EBV	Sang	 sérum vec gel, sérum gel jaune			T° ambiante		BOIS-JOLI

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptier	Autre réceptier possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
ECBU Examen cyto bactériologique des urines	ECBU	Urines	 échantillon urine		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? Retenue de 3 heures Toilette, 2e j	Sans conservateur - 2 h à T° ambiante ou 12 h à 2-8 °C		MALASSIS ou site de prélèvement (si pvt fin de journée)
Electrophorèse de l'hémoglobine	ELHB	Sang	 plasma edta	 héparine gel,citrate		Ne pas conserver les sangs à température ambiante.		CENTRE
Electrophorèse des protéines	ELP	Sang	 sérum gel jaune	 sérum vec gel	Exempt d'hémolyse. Mettre une pastille orange sur le tube de chimie pour que les protéines soient dosées en priorité et puissent passer en electro.	T° ambiante		CENTRE
Expectorations, crachats (examen microbiologique)	ECBC	Crachats (non salivaire)			Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? Imperativement le matin, rincer la bouche à l'eau, effort de toux avant le recueil, ramener immédiatement au laboratoire	2h à T° ambiante		MALASSIS

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptif	Autre réceptif possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Fer	FES	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune	Traitement ? Impérativement le matin à jeun. Exempt d'hémolyse	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Ferritine	FERI	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune		6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Fibrinogène	FIB	Sang	 citrate		Traitement anticoagulant ? Remplissage du tube >80% Garrot < 1 min.	24 h maxi. à T° ambiante	sinon congeler l'échantillon	ARAGON
Fibromax	Codes voir C1-INS-08	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune,gris	 héparine gel,sérum vec gel,gris	Demander le poids et la taille	T° ambiante	(2-8°C pour le tube Biomnis)	ARAGON + Biomnis
Fibromètre A (alcool)	Codes voir C1-INS-08	Sang	 citrate,plasma edta,sérum gel jaune,sérum gel jaune	 citrate,plasma edta,sérum vec gel,sérum vec gel	Congeler après centrifugation dans les 4h, un des tubes de sérum pour envoi Biomnis	T° ambiante	(2-8°C pour les tubes Biomnis)	ARAGON + Biomnis
Fibromètre S (stéatose)	Codes voir C1-INS-08	Sang	 héparine gel,citrate,plasma edta,gris,sérum gel jaune	 héparine gel,citrate,plasma edta,gris,sérum vec gel	Congeler après centrifugation dans les 4h, le tube de sérum pour envoi Biomnis	T° ambiante	(2-8°C pour le tube Biomnis)	ARAGON + Biomnis

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Récipient	Autre récipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Fibromètre V (virus) (à choisir par défaut si le type de fibromètre n'est pas précisé sur l'ordonnance)	Codes voir C1-INS-08	Sang	  héparine gel,citrate, plasma edta,sérum gel jaune,sérum gel jaune	  héparine gel,citrate, plasma edta,sérum vec gel,sérum vec gel	Congeler après centrifugation dans les 4h, un des tubes de sérum pour envoi Biomnis	T° ambiante	(2-8°C pour les tubes Biomnis)	ARAGON + Biomnis
Fibrotect	Codes voir C1-INS-08	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 héparine gel,sérum vec gel		T° ambiante	(2-8°C pour le tube Biomnis)	ARAGON + Biomnis
Folates = Ac. folique = Vit. B9	FOP	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune	Traitement ? Exempt d'hémolyse Contexte Clinique	48 h à T° ambiante (*)		ARAGON
FSH	FSH (+DDR)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune	Date des dernières règles	T° ambiante		ARAGON
Gamma GT	GGT	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Glucose glycémie post-prandiale	GLP	Sang	 héparine gel	    gris,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	1h30 à 2h après petit déjeuner copieux ou déjeuner. Tube gris si prélèvement à domicile ou glycémie isolée	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Glucose Hyperglycémie provoquée par voie orale - 75 g de glucose (chez la femme enceinte)	HGO75	Sang	 gris	 héparine gel,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Jeûne strict de 8 heures	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON
Glucose Hyperglycémie provoquée par voie orale (pas chez la femme enceinte)	HGO	Sang	 gris	 héparine gel,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Jeûne strict de 8h. Prélever à T0 puis donner le glucose et prélever aux temps précisés sur l'ordo. ou à défaut à T30, T60, T90, T120, T150, T180 min.	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	
Glucose Glycémie à ``x`` heures	GLY2	Sang	 gris	 héparine gel,sérum vec gel,sérum gel jaune	Tube gris si prélèvement à domicile ou glycémie isolée	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON
Glucose Glycémie après charge (2 pvts seulement (à jeun et 1 h) sinon utiliser code HGO)	GAG	Sang	 héparine gel	 gris,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	1er pvt - jeune de 8 heures Tube gris si prélèvement à domicile ou glycémie isolée	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Glucose Glycémie après petit déjeuner	GLPD	Sang	 gris	 héparine gel,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	1h30 à 2 h après le début du petit déjeuner Tube gris si prélèvement à domicile ou glycémie isolée	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON
Glucose à jeun glycémie réalisée à domicile	GLYD	Sang	 gris	 héparine gel,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Jeûne strict de 8 heures Tube gris si prélèvement à domicile ou glycémie isolée	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON
Glucose à jeun glycémie réalisée au laboratoire	GLY	Sang	 héparine gel	 gris,sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Jeûne strict de 8 heures Tube gris si prélèvement à domicile ou glycémie isolée	2h à T° ambiante (tube vert)	24h à T° ambiante (tube gris)	ARAGON
Glucose urinaire sur échantillon	GLU	Urines	 échantillon urine			< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement
Glucose urinaire dosé	GLU24	Sang	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil.	T° ambiante		ARAGON
Groupe Phénotype	GPH (2ème deter)	Sang	 plasma edta	 citrate	Grossesse ? Bilan pré-opératoire ?	T° ambiante		CENTRE

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptier	Autre réceptier possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Groupe Phénotype + RAI	GPR (1ere deter)	Sang	 plasma edta	 citrate	Grossesse ? Bilan pré-opératoire ?	T° ambiante		CENTRE
Haptoglobine	HAPT	Sang	 héparine gel	    sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta,citrate		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
HCG	HCGA	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	    sérum vec gel,plasma edta,citrate,gris	Date des dernières règles	T° ambiante		ARAGON
HCG depistage	HCG	Sang ou urines	 sérum gel jaune	 sérum vec gel,echantillon urine	Date des dernières règles	T° ambiante		Sur site de prélèvement
HDL - Cholesterol	CHD	Sang	 héparine gel	  sérum vec gel,sérum gel jaune		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réipient	Autre réipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Hémocultures	HEM HEM2 HEM3	Sang	 Hémoculture		Température du patient au moment du prélèvement prise d'antibiotiques ? Au cours de pic fébrile ou de frissons. Désinfecter l'opercule des flacons d'hémoculture et le point de ponction avec anti	T° ambiante		MALASSIS
Hémoglobine glyquée HBA1c	HBG	Sang	 plasma edta			72 h à T° ambiante (*)		ARAGON
HIV	HIV	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta		T° ambiante		ARAGON
IgE Totale	IGE	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Immunofixation sérique	IF	Sang	 sérum gel jaune	 sérum vec gel		Ne pas conserver les sérums à température ambiante.		CENTRE
K - Potassium (sang)	KP + SANSG (si pvt sans garrot)	Sang	 héparine gel		Pvt sans garrot si précisé sur la prescription. Exempt d'hémolyse	< 6 h à T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptier	Autre réceptier possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
K - Potassium urinaire 24h	KU	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil.	2h à T° ambiante		ARAGON
K - Potassium urinaire sur échantillon	KUE	Urines	 echantillon urine			T° ambiante		ARAGON
Latex (facteur rhumatoïde)	LAT	Sang	 sérum gel jaune	 sérum vec gel	Exempt d'hémolyse Congeler les échantillons prélevés le samedi après passage du coursier	T° ambiante		CENTRE
LDH Lactate deshydrogénase	LDH	Sang	 héparine gel	 sérum gel jaune, sérum vec gel, plasma edta	Domicile déconseillé Exempt d'hémolyse	2 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Leucocytes urinaires	LEU	Urines	 echantillon urine	 plasma edta		< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement
LH	LH (+DDR)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta, gris	Date des dernières règles	T° ambiante		ARAGON
Lipase	LIPA	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Liquide synovial (ponction articulaire)	LIS				Signes cliniques Prise d'antibiotiques ? Transfert du prélèvement dans 1 tube citraté à Malassis (pour bactériologie et protéides au)	24h à 2-8°C (♣)		MALASSIS
Lyme	LYME	Sang	 sérum gel jaune, sérum gel jaune	 sérum vec gel, plasma edta		T° ambiante		CENTRE
Magnesium	MGP	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Magnesium urinaire	MGU	Urines	 échantillon urine	 urine 24h	Avant l'analyse, l'urine doit être acidifiée (env. pH 1).	T° ambiante		ARAGON
Métamphétamines urinaires	METAM	Urines	 échantillon urine		Uriner au laboratoire dans un flacon sans conservateur	8 h à T° ambiante		CENTRE
Microalbumine sur 24h	MIC ou ALBM si MIC >1g/L	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil.	2h à T° ambiante		ARAGON
Microalbumine sur échantillon	MICE ou ALBEM si MICE >1g/L	Urines	 échantillon urine		1ères urines du matin (urine restée dans la vessie)	T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
MNI test	MNI	Sang	 sérum gel jaune	 sérum vec gel, plasma edta	Test unitaire	T° ambiante		ARAGON
Mycoplasmes	RM				Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon Dacron ou Bactopick à l'exocol, urètre, urines, sperme.	T° ambiante milieu de transport UMMt		MALASSIS
Mycoplasmes sérologie	SDM	Sang	 sérum gel jaune, sérum gel jaune	 sérum vec gel	Domicile non conseillé	Congeler si > 3h		CENTRE
Na Sodium (sang)	NAP	Sang	 héparine gel	 sérum gel jaune, sérum vec gel		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Na-U Sodium urinaire sur 24h	NAU	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil.	2h à T° ambiante		ARAGON
Na-U Sodium urinaire sur échantillon	NAUE	Urines	 échantillon urine			T° ambiante		ARAGON
Nitrites urinaires	NIT	Urines	 échantillon urine		Test sur urines fraîches	< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
NT-Pro BNP	BNP	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		T° ambiante		ARAGON
Numération Formule	NF	Sang	 plasma edta		Si pvt après dernier passage du coursier - faire un frottis	24 h à T° ambiante (£££)		ARAGON
Oestradiol	OEST (+DDR)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Date des dernières règles	T° ambiante		ARAGON
Opiacés urinaires ( Héroïne, Morphine)	OPIAC	Urines	 echantillon urine		Uriner au laboratoire dans un flacon sans conservateur	8 h à T° ambiante		CENTRE
Paludisme (Hématozoaires du paludisme)	GOE	Sang	 plasma edta	 héparine gel,gris	Voyages ? Prophylaxie ? Fièvre ?	T° ambiante		ARAGON
Parasitologie des selles	PAR	Selles	 selles		Signes cliniques ? Voyage ? Volume minimal - 1 noix Apporter rapidement le prélèvem	T° ambiante		MALASSIS
pH urinaire	PH.	Urines	 echantillon urine			< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Phosphatase alcaline	PAL	Sang	 héparine gel	  sérum vec gel,sérum gel jaune		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Phosphore (sang)	PHP	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Prélever à jeun	4 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Phosphore urinaire sur échantillon	PHUE	Urines	 echantillon urine		Acidifier l'urine à l'acide chlorhydrique après le recueil (pH < 3)	T° ambiante		ARAGON
Phosphore urinaire sur 24h	PHU	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil. Acidifier l'urine à l'acide chlorhydrique après le recueil (pH < 3)	2h à T° ambiante		ARAGON
Pityriasis versicolor	PITY	Cutané			Scotch test sur la lésion cutanée	T° ambiante		MALASSIS
Plaquettes	PLA	Sang	 plasma edta	 citrate	Si agrégats sur EDTA prélever sur tube citraté	T° ambiante		ARAGON
Préalbumine sérique	PREA	Sang	 sérum vec gel	  sérum gel jaune,héparine INTERDIT		T° ambiante		ARAGON

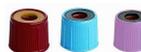
Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptier	Autre réceptier possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Prélèvement conjonctival	CONJ		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement de bouche	BUC		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ou antifongiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement de gorge	ECBG		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement de nez, sinus	NEZ		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement de plaie purulente	PUS		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Récipient	Autre récipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Prélèvement d'oreille	ORE		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement génital femme (vulvaire)	PGF		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement uréthro-génital homme (y compris 1er jet urinaire)	PU		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? Si écoulement - 1 écouvillon de transport + 2 écouvillons secs dont 1 humidifié	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvement vaginal	ECBV		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 2 écouvillons secs dont 1 humidifié. Si poss	T° ambiante		MALASSIS

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Récipient	Autre récipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Prélèvements cutanés (plaie non purulente)	PEAU 1, PEAU 2, PEAU 3		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon de transport + 1 écouvillon sec.	T° ambiante		MALASSIS
Prélèvements mycologiques	MY1, MY2, MY3		 écouvillon		Signes cliniques ? Prise d'antibiotiques ? Contact animalier ? Si lésé	T° ambiante		MALASSIS
Progestérone	PROG (+DDR)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta, gris	Date des dernières règles Traitement	T° ambiante		ARAGON
Prolactine	PRO (+DDR)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta	Traitements en cours ? Noter le(s) nom(s) de médicament(s) Entre 7 h et 10 h, après un repos de 10 min.	T° ambiante		ARAGON
Protéines urinaires sur 24h	ALBB	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil.	2h à T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Protéines urinaires sur échantillon	ALBU	Urines	 échantillon urine		Bandelette - si (+) saisir le code (P) dans le SIL et envoyer échant. sur ARAGON	4 h à T° ambiante		ARAGON + site de prélèvement
Protéinurie de Bence Jones	ABJ	Urines	 urine 24h	 échantillon urine	Urines de 24h de préférence - conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil. Echantillon	Ne pas conserver les échantillons d'urine à température ambiante.		CENTRE
Protides totaux	PRS	Sang	 héparine gel	 plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Protides totaux (pour électrophorèse)	ELP	Sang	 sérum vec gel	 sérum gel jaune	Mettre une pastille orange sur le tube pour que les protéines soient dosées en priorité et puissent passer en electro.	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
PSA libre	PSAL	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta		4 h à T° ambiante ( ££)		ARAGON
PSA total	PSA	Sang	 héparine gel,sérum gel jaune	 sérum vec gel,plasma edta	Traitement ? Contexte clinique ?	T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
PTH	PTH	Sang	 plasma edta	 sérum vec gel,sérum gel jaune	Traitement ? Exempt d'hémolyse Serum prélevé sur tubes st	72 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Pus, drain, ...	PUS		 écouvillon		Signes cliniques? Prise d'antibiotiques ? Apporter le prélèvement au labo le plus rapidement possible. Mettre dans u	T° ambiante		MALASSIS
RAI isolée	RAI	Sang	 plasma edta	 citrate	Femme enceinte ? Groupe et Rh connus ? Injection Rophylac ? Date de l'injection ? Echantillon frais. Si femme enceinte avec ordo. RAI, préleve	T° ambiante		CENTRE
Rapport albuminurie sur créatininurie (A/C)	MCE	Urines			Sans objet	Sans objet		ARAGON
Recherche de sang dans les urines (bandelette)	SGU	Urines	 echantillon urine		1er jet	< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Récipient	Autre récipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Recherche d'une bactérie désignée	1BAC		 écouvillon		Signes cliniques? Prise d'antibiotiques ?	T° ambiante		MALASSIS
Recherche E. Coli dans PV	COLI		 écouvillon		Signes cliniques? Prise d'antibiotiques ? 1 écouvillon transport	T° ambiante		MALASSIS
Réticulocytes	RET	Sang	 plasma edta			24 h à T° ambiante (£££)		ARAGON
Rotavirus	ROT	Selles	 selles		Autres cas dans l'entourage ?	T° ambiante		MALASSIS
Rubéole IgG	RUB1 (deter. 1) RUB2 (deter. 2)	Sang	 héparine gel, sérum gel jaune	 sérum vec gel, citrate, plasma edta	Vaccination ?	T° ambiante		ARAGON
Sang dans les selles J1	RSS	Selles	 selles		Selles à ramener au laboratoire juste après émission	A mettre au réfrigérateur dès réception		Sur site de prélèvement
Sang dans les selles J2	RSS2	Selles	 selles		Selles à ramener au laboratoire juste après émission	A mettre au réfrigérateur dès réception		Sur site de prélèvement
Sang dans les selles J3	RSS3	Selles	 selles		Selles à ramener au laboratoire juste après émission	A mettre au réfrigérateur dès réception		Sur site de prélèvement

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Scotch test	SCO				Au niveau de l'anus. A ramener au laboratoire dans les plus brefs délais.	T° ambiante		Sur site de prélèvement ou MALASSIS
Sels et pigments biliaires	S+P	Urines				< 4 h T° ambiante		Sur site de prélèvement
Spermoculture (avec mycoplasmes)	SPER	Sperme			Signes cliniques? Prise d'antibiotiques ? Abstinence 2-5 jours, toilette du gland et	2h à T° ambiante	Ne pas réfrigérer	MALASSIS
Stérilet, mèche, redon (examen microbiologique)	PDIV	Stérilet, Mèche, Redon				T° ambiante		MALASSIS
Strepto B - PV	STRB				Signes cliniques? Prise d'antibiotiques ? Pas de spéculum nécessaire, 1 seul écouvillon de transport	T° ambiante		MALASSIS
T3 libre	T3L	Sang			Traitement	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON



échantillon urine



écouvillon



héparine gel



sérum vec gel, sérum gel jaune, plasma edta

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Récipient	Autre récipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
T4 libre	T4L	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Traitement	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Taux de prothrombine (TP) -INR - personne sous traitement anticoagulant par AVK	TP	Sang	 citrate		Remplissage du tube >80% Garrot < 1 min. Absence de micro-caillots.	24h maxi. à T° ambiante	sinon congeler l'échantillon	ARAGON
Temps de céphaline activée TCA - TCK	TCA	Sang	 citrate		Remplissage du tube >80% Garrot < 1 min. Absence de micro-caillots.	8 h maxi. à T° ambiante	sinon congeler l'échantillon	ARAGON
Temps de Quick Absence de traitement	TP1	Sang	 citrate		Remplissage du tube >80% Garrot < 1 min.	24 h maxi. à T° ambiante	sinon congeler l'échantillon	ARAGON
Temps de saignement	TS (oreille) IVY (bras)	Sang			Prise d'aspirine depuis 8 jours ? Methode Duke (oreille) - desinfection lobe oreille à la lingette antiseptique (pas d'alcool), inciser avec lancette	Sans objet		Sur site de prélèvement
Test au synacthène = Cortisol après Synacthène	SYNAC	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Traitement, contexte clinique 1er pvt avant injection 2e pvt 30 min. après injection	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Test de freinage à la dexaméthasone (dosage du Cortisol)	CORF	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Traitement, contexte clinique Noter IMPERATIVEMENT l'heure de prélèvement. Cortisol ``8h`` ou en l'absence d'heure notée sur l'ordonnance, prélever entre 7h30 et 10 h du matin.	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Testostérone	TES	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta				ARAGON
Testostérone (femmes et enfants)	TESF	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta				ARAGON
Thyroglobuline	THY	Sang	 sérum vec gel	   sérum gel jaune,héparine gel,plasma edta				ARAGON
Toxo IgG et IgM	Femme enceinte deter 1 = TOXG deter 2 = TOX (si +) ou TOXS (si -) Hors grossesse TOX1 puis TOX2	Sang	  héparine gel,sérum gel jaune	   sérum vec gel,plasma edta,citrate	Grossesse ?			ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Réceptient	Autre réceptient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Transferrine	CAPA	Sang	 héparine gel	  sérum vec gel,sérum gel jaune	Prélèvement impérativement à jeun	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Triglycérides	TRI	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Jeûne strict de 12 heures	8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Troponine	TRO	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		T° ambiante		ARAGON
TSH	TSH	Sang	 héparine gel	     sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta,citrate,gris	Traitement ? De préférence le matin	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Urée (sang)	URS	Sang	 héparine gel	   sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta		8 h à T° ambiante (*)		ARAGON
Urée urinaire sur 24h	URU	Urines	 urine 24h		Conserver les urines au réfrigérateur pendant le temps du recueil.	2h à T° ambiante		ARAGON
Urée urinaire sur échantillon	URUE	Urines	 echantillon urine			T° ambiante		ARAGON

Analytes	Code Biowin	Type de prélèvement	Récipient	Autre récipient possible	Conditions de prélèvement /renseignements cliniques	Conditions de transport	Stabilité avant prétraitement	Plateau technique du LBM
Varicelle - Zona	VZ	Sang	 sérum gel jaune,sérum gel jaune	 sérum vec gel		T° ambiante		BOIS-JOLI
Vitamine B12	B12	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Traitement ?	6 h à T° ambiante (***)		ARAGON
Vitamine D Totale	D23 ou DHN (si non remboursé)	Sang	 héparine gel	 sérum vec gel,sérum gel jaune,plasma edta	Traitement ?			ARAGON
Vitesse de sédimentation	VS	Sang	 citrate vs	 plasma edta		T° ambiante		ARAGON
Waalser Rose (facteur rhumatoïde)	WR =WAL+LAT WAL = waalser rose seul	Sang	 sérum gel jaune	 sérum vec gel	Exempt d'hémolyse Congeler les échantillons prélevés le samedi après passage du coursier	T° ambiante		CENTRE